

# エアーフットマッサージャー

品番：TF3000

## 取扱説明書


### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

ご購入ありがとうございます。  
ました。

ご使用になる前に、この取扱  
説明書を必ずお読みいただき、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに  
なる方がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。

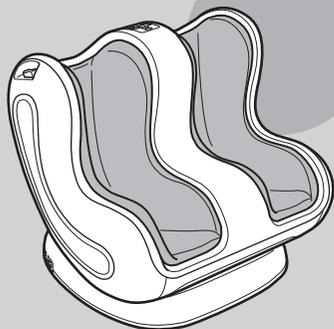

## もくじ



安全上のご注意 …………… 1～4  
各部のなまえと  
はたらき …………… 5



使いかた …………… 6～8



お手入れのしかた …………… 8



故障かな?と思ったら …………… 9



仕様 …………… 9  
アフターサービス …………… 10  
保証書 …………… 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
  - 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
  - 心臓に障害のある人
  - 妊娠中や出産直後の人
  - 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
  - 治療部位に創傷のある人
  - 安静を必要とする人
  - 体温38℃以上(有熱期)の人  
例：急性炎症症状(けん急感・悪寒・血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
  - 骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
  - 上記以外に、とくに身体に異常を感じている人
  - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 事故や体調不良をおこす恐れがあります。

# 安全上のご注意



必ず守る

ご使用前には、必ず布カバーが破れていないか確認する。  
(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがの恐れがあります。

電源は交流100Vを使用する。

本製品は日本国内専用です。  
交流(AC)100V以外の電源を使用すると、火災や感電の原因になります。

付属の電源コード以外は使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

感電や発熱による火災の原因になります。

電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。

プラグにほこりなどがたまりると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。  
電源コードを抜いた状態で、必ず乾いた布で拭いてください。

リクライニングする時は、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。

事故やけがの恐れがあります。



電源プラグを抜く

ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。



禁止

次の人は使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。  
例：血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。

症状を悪化させる恐れがあります。

自分で意思表示ができない人や自分で操作できない人には使用させない。

事故やけがの恐れがあります。

幼児や子供に本体の上や、まわりで遊ばせない。

けがや故障の恐れがあります。

子供に使用させない。  
また、使用中は子供を近づけない。

事故やけがの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをするとき口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

足部、ふくらはぎ部以外のマッサージに使用しない。

事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。

使用中に本体に足を入れた状態で立ち上がらない。

事故やけがの恐れがあります。

本体の上に立ったり、座ったりまたは踏み台にしたりしない。


けがや故障の原因になります。



本体のすき間や、スライド機構部の穴に指を入れない。

けがの恐れがあります。

禁止

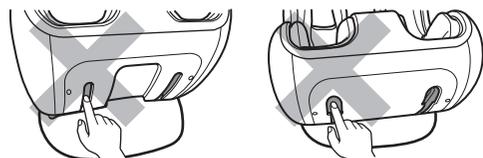

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない。

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- 電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- 電源コードが傷ついたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
- 電源コードを本製品に巻き付けない。
- 電源コンセントや配線器具など、たこ足配線などで定格を超える使いかたはしない。



絶対に分解や改造、修理をしない。

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをする恐れがあります。

分解禁止



身体がぬれた状態で本製品を使用しない。

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電の原因になります。

## ⚠️ 注意



必ず守る

本製品は一般家庭用なので、業務用として使わない。

使用中、からだに異常が現れた場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する。

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこす恐れがあります。

本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用を避ける。

同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。

ご使用前には、必ず電源スイッチ、操作ボタン、内蔵タイマーなどが正常に動作するか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

本製品は突起物がなく、平らで滑りにくい安定した場所で使用する。

不安定な場所で使用した場合、使用中に本体が動き出し、事故やけがの恐れがあります。

長期間使用しなかった場合は、使用前に動作の確認をする。

内部部品が劣化している場合、事故やけがの恐れがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



電源プラグを抜く

動かなくなった時や、異常を感じた時は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



電源プラグを抜く

停電のときはただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがの恐れがあります。

お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



禁止

他の健康用機器や治療器と併用して使わない。

事故やけが、体調不良をおこす恐れがあります。

食後および飲酒後は使用しない。

体調不良をおこす恐れがあります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない。

けがや故障の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない。漏電やショート、故障の原因になります。

本体を移動する時は引きずらない。

床や畳などを傷つける恐れがあります。

エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めない。

けがや故障の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない。

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。



禁止

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。

火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

お手入れはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない。

変形や変色、変質など本体の外装を痛めるだけでなく、ひび割れによるけがの恐れがあります。



水ぬれ禁止

本体や操作部に水などをこぼさない。

火災や感電、故障の原因になります。




水場禁止

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない。

火災や感電、故障の原因になります。



# 各部のなまえとはたらき

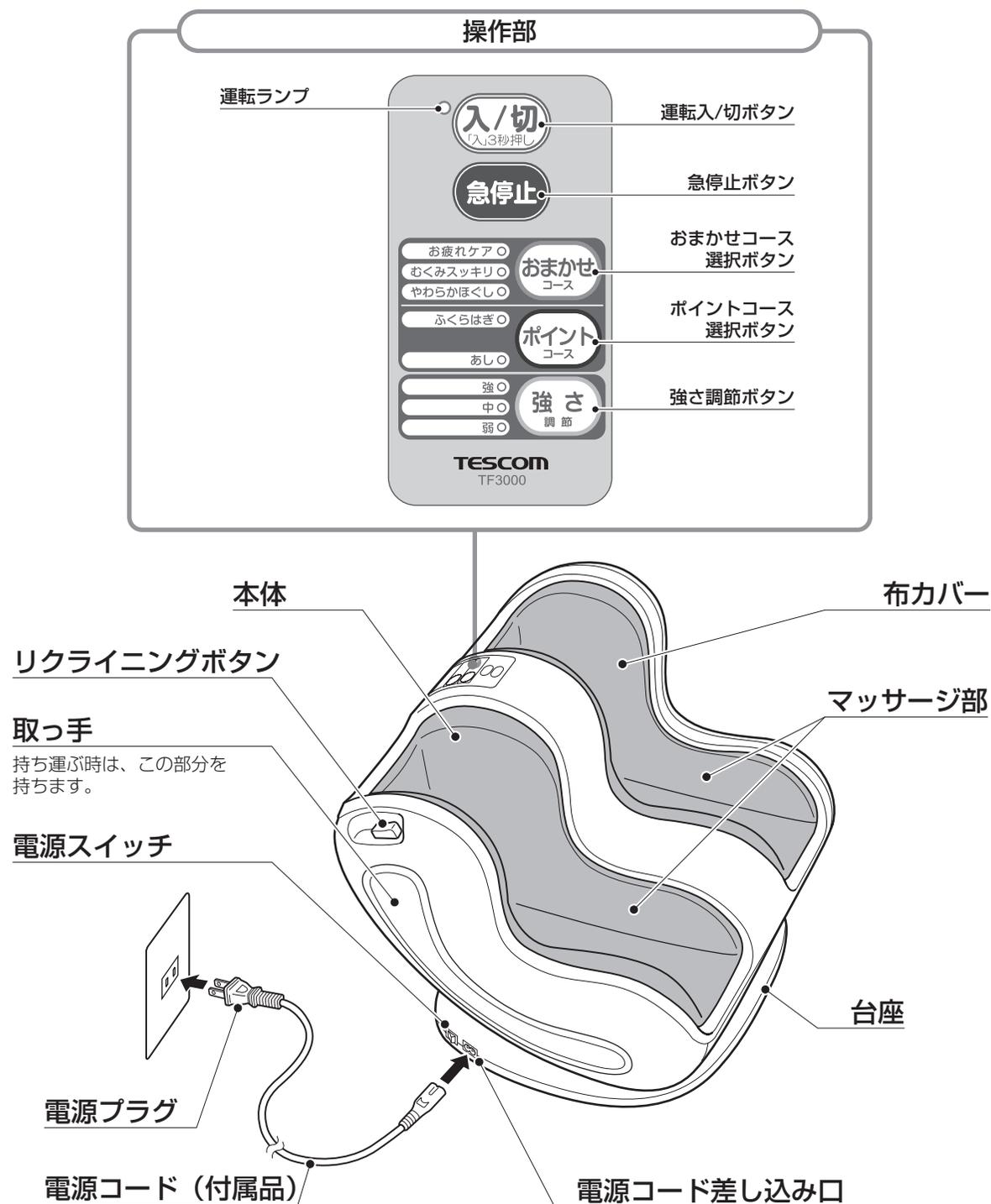

### 内蔵タイマー

最後にコースを選択してから約15分でタイマー機能が働き、自動的に電源が切れます。




# 使いかた

## 使用前の準備


- 1 本体を設置する。**
  - 本体を安定した場所に置いてください。
  - カーペットの上に直接置くと、底面のゴム脚の跡が残る場合がありますのでご注意ください。
  - テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。また同じコンセントを使用しないでください。AV機器に雑音が入ることがあります。
- 2 布カバーが破れていないか確認する。**
  - ご使用前には、必ず布カバーが破れていないか確認してください。布カバーが破れている場合は使用せず修理を依頼してください。布地が破れた状態で使用すると、感電やけがの恐れがあります。

## 基本的な使いかた


- 1 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源コードを本体と接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。**
- 2 電源スイッチを「入」にする。**
  - 電源コード差し込み口の左側にあります。

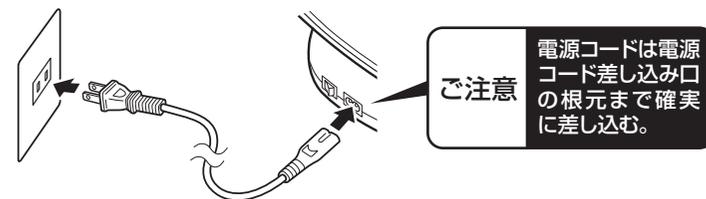

- 3 マッサージ部に足を入れ、リクライニングボタンを押しながら位置を調節する。**

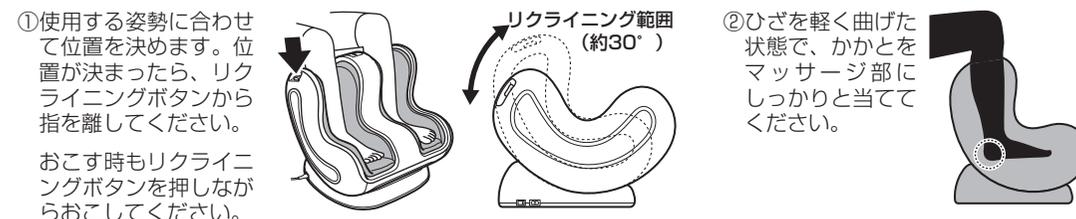

### リクライニング使用例

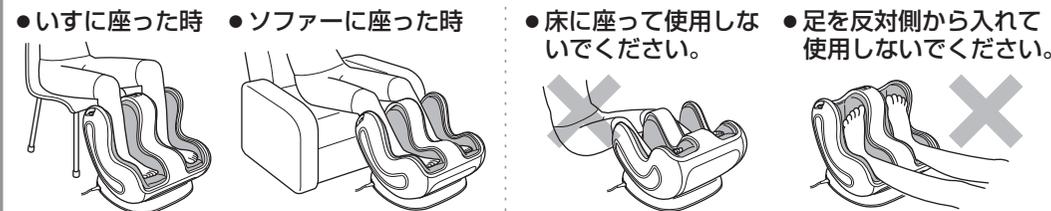

### ご注意


- キャスター付きの椅子に座って使用しない。
- マッサージ部に足を入れない状態でリクライニングをおこそうとすると、急に戻る恐れがありますのでご注意ください。

次ページにつづく

4 運転入/切ボタンを長押しする。

- 運転ランプが赤く点灯します。

※3秒長押しすると、チャイルドロックが解除され、運転ランプが点灯します。  
 ※運転ランプ点灯後、なにも操作しないと5分後に「切」の状態になり、運転ランプが消えます。

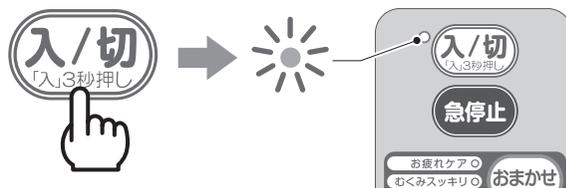

5 マッサージのコースを選択する。

- マッサージが始まります。
- マッサージは約15分で自動的に終了します。
- 各コースの選択ボタンは、押すごとにモードが切り替わり、ランプで表示します。



おまかせコース

「おまかせ」コース選択ボタン (約15分)  
 その日の気分によって選択できる、おまかせ自動コース

- お疲れケア：足全体をしぼりあげる動作で念入りにもみほぐす「もみ中心」のマッサージコース。
- むくみスッキリ：足全体をもみほぐしながら、足裏を重点的に刺激する「指圧中心」のマッサージコース。
- やわらかほぐし：足全体をやさしくもみほぐしながら、足裏を心地よく刺激する低圧のマッサージコース。

ポイントコース

「ポイント」コース選択ボタン (約15分)  
 お好みの重点部位範囲を選択できる、部位別自動コース

- ふくらはぎ：「ふくらはぎ」～「足首」を重点的にマッサージするコース。
- あし：「足裏」～「足首」を重点的にマッサージするコース。  
 ※「ふくらはぎ」は動作しません。


6 マッサージの強さを調節する。

- 強さ調節ボタンは、押すごとに右記矢印のようにマッサージの強さが切り替わり、ランプで表示します。



強さは3段階で調節できます。  
 ※おまかせコース・ポイントコースどちらでも調節できます。

7 マッサージが終わったら、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

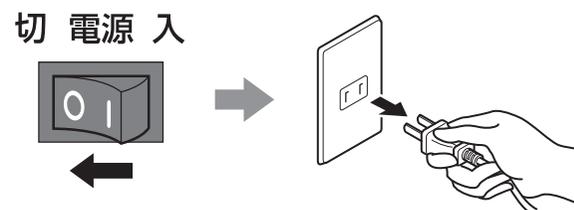

マッサージを途中でやめるには

操作部の運転入/切ボタンを押してください。運転ランプが消えて停止します。

身体に異常を感じたり、非常事態が起こったりしたときは

すぐに急停止ボタンを押してください。その場でマッサージが停止します。運転が停止したら、運転入/切ボタンを押してください。運転ランプが消えます。

ご注意

- 動作中にコースを変更すると、内蔵タイマーが一度リセットされ、15分以上動作するので注意する。
- 故障の原因になるので操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さない。
- 本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用はしない。同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良を起こす恐れがあります。

使用目的/効能または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



お手入れのしかた

お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

本体 (プラスチック部)

乾いた布でからぶきしてください。よごれがひどい時は、水または中性洗剤をしみこませてよく絞った布で拭き取ったあと、柔らかい布でからぶきしてください。

布カバー

水または中性洗剤をしみこませ、よく絞った布で拭き取ってください。その後乾燥させてください。  
 ※布カバーは取り外しできません。

ご注意

- 使用後は湿気の少ない場所に保管する。また長時間使用しない場合は、よごれを取ったあと、布などのカバーをかけ、ほこりがかからないように注意する。



## 故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪い時はただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。  
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
音が気になる。	● 構造上、音が出ることもある。	● 機能に影響はありませんので、引き続きそのままお使いください。
動かない。	● 電源プラグが抜けている。 ● 電源スイッチが入っていない。 ● 運転ランプが点灯しない。	● 電源プラグを正しく接続する。 ● 電源スイッチを入れる。 (6ページ参照) ● 運転入/切ボタンを3秒長押しする。
使用中に停止した。	● 内蔵タイマーの働きによるもので、本製品は最終コース選択後15分で自動的に停止します。	● 機能に問題はありませんが、使用時間を守ってお使いください。
操作部ボタンが機能しない。		● 電源スイッチを一度切り、入れなおしてください。
布カバーが破れた。		● 使用を中止し、修理を依頼してください。
電源コードが損傷・断線した。		● 使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### 廃棄について

地球環境保護のため、本製品を廃棄する時は、そのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。

日本製

仕様	品名	エアーフットマッサージャー	一般的名称	家庭用エアマッサージ器
	品番	TF3000	医療機器製造販売業	株式会社惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力	40W	医療機器製造販売業許可番号	25B2X10001
	定格時間	15分	医療機器認証番号	222AGBZX00162A01
	内蔵タイマー	約15分		
	質量	約13kg	材質	本体：ABS樹脂 布カバー：ポリエステル、ポリウレタン
	寸法	高さ480×幅490×奥行き450 (mm)	足サイズ	21.5cm～28cm
	電源コード長さ	約1.9m		
使用目的／ 効能・効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 ● 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解			



## アフターサービス

### 1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき


ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時～17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ

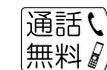

0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

<p><b>愛情点検</b></p> 	<p><b>●長年ご使用のエアークットマッサージャーの点検を！</b></p>	<p><b>ご使用 中止</b></p>
<p>こんな症状は ありませんか</p>	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●こげくさい臭いがする。</li> <li>●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。</li> <li>●その他、異常や故障がある。</li> </ul>	<p>事故防止のため、電源プラグ を抜き、販売店に点検・修理 をご相談ください。</p>

**〈無料修理規定〉**

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (日)使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (月)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (火)火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - (水)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - (木)本書の提示がない場合。
  - (金)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**●修理メモ**

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書						持込修理
品 番	TF3000	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体	
★お客様	ご芳名		★販売店	★お買い上げ年月日		
	ご住所 (〒 )			年 月 日		
				住所・店名		
お電話		電話				