TESCOM

ハンディマッサージャー

品番: TMS100

添付文書

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうござい ました。

で使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、 正しくで使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られると ころに必ず保管してください。

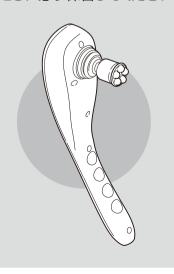

もくじ



安全上のご注意 ············ 1~4 各部のなまえとはたらき ······· 5



使いかた……………6~7



お手入れのしかた ······ 8 仕様····· 8



故障かな?と思ったら ……… 9



アフターサービス ······10 保証書 ······ 裏表紙





安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危 害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能 性や物的損害のみの発生が想定される内容 を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の 内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこ と(強制)」の内容をお知らせす るものです。



(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜く)

⚠警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前 に医師と相談する。

- 電気機器を使用している人
 - ●悪性しゅよう (腫瘍) のある人
 - ●心臓に障害のある人
 - ●妊娠中または出産直後の人
 - ●糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
 - ●皮膚に創傷のある人
 - ●安静を必要とする人
 - ●体温38℃以上(有熱期)の人

例: 急性炎症症状 [けん(倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期や衰弱しているとき

- ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、 肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ●背骨(せきつい)に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人
- ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- ●上記以外に、特に身体に異常を感じている人
- ●けんしょう (腱鞘) 災の人
- ●頭痛の人
- ●頭および顔に疾患のある人

事故や体調不良、けがの恐れがあります。



次の人は使用しない。

- ●医師からマッサージを禁じられている人。 例:血栓 [そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう (瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、 皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- ●自分で意思表示ができない人や、自分 で操作できない人。

症状悪化やけが、事故の恐れがあります。

マッサージ以外の用途に使用しない。

けがや事故の恐れがあります。

頭部・のど・胸部・腹部・関節や骨の上 に使用しない。

体調不良、けがの恐れがあります。



必ず守る

使用中に身体に異常があらわれたり感じ たときや、使用しても効果が現れない場 合は、ただちに使用を中止し、医師に相 談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

ご使用前には、必ず本体やアタッチメン トが破損・変形したり、内部構造が露出 していないか確認する。

(異常があった場合は、ただちに使用を 中止して電源プラグを抜き、修理を依頼 してください。)

けが・感電・事故の恐れがあります。

交流100Vで使用する。(日本国内専用)

火災や感電の恐れがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。 (ほこりは、乾いた布でふき取る。)

プラグにほこりなどがたまると湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグ・DCプラグは根元まで正しく 確実に差し込む。

発熱による火災や感電の恐れがあります。



使用後・お手入れをするときは、必ず 雷源プラグをコンセントから抜く。

_{電源プラグ} 火災や感電、けがの恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、 コードを引っ張らずに電源アダプターを 持って抜く。

感電・ショートの恐れがあります。



たこ足配線や、電源コンセントの定格を 超える使いかたをしない。

・ ** 」
・
火災の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。

- ●無理に曲げない ●ねじらない
- ●引っ張らない ●重いものをのせない
- ●熱いものに近付けない
- ●はさみ込まない●加工しない
- ●束ねたまま使わない
- ●本体や電源アダプターに巻き付けない

火災・感電・やけど・ショートの恐れが あります。

長期間の使用や誤使用により、電源コー ドが断線する恐れがあるため、次の状態 が確認されたときは使わない。

- ●電源コードがねじれて戻らなくなった
- ●電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- ●コンセントの差し込みがゆるい
- ●電源コードが異常に熱い

火災・感雷・やけど・ショートの恐れが あります。



専用の電源アダプター 型式: IVP0900-2000P(TAD35)以外

は使わない。

また、専用の電源アダプターを、別の 製品に使わない。

火災や感電、故障の恐れがあります。

子供に使わせない。 子供の手の届く場所に保管しない。 使用中は子供を近づけない。 また、本体の上や、本体の周辺で遊ばせ ない。

けがや事故の恐れがあります。

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーな ど)を子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどし て、窒息や誤飲する恐れがあります。



電源アダプターをぬれた手で使わない。 身体がぬれた状態で使用しない。

ー ぬれ手禁止 感電の原因になります。



修理技術者以外は、絶対に分解・修理 ・改造をしない。

機器が故障した場合は、勝手に修理など をせずに、販売店またはお客様ご相談窓 口にご相談ください。

火災や感電、けがの恐れがあります。

△注意



使用前に、各ボタンやタイマーが 正常にかつ安全に動作することを確認 する。

必ず守る

けがや事故の恐れがあります。

長期間使用しなかったときは、取扱説明 書をもう一度読み、本製品が正常にかつ 安全に動作することを確認してから使う。

内部部品が劣化している場合、けがや事 故の原因となります。

動かなくなったり異常を感じたときは、 ただちに使用を中止し、電源プラグを 抜いて、お買い上げ販売店に相談する。

本製品の使用時間は1日1回、15分以内 とし、同じ箇所への使用は3分までとする。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激とな る恐れがあります。

必ずグリップ部を手で持って使用する。

けが・事故・故障の恐れがあります。

使用中停電になったときは、ただちに 電源プラグをコンセントから抜く。

通電が再開したときに、けがや事故の 恐れがあります。



他の治療器などと同時に使用しない。

気分が悪くなったり、体調不良をおこす 恐れがあります。

食後すぐや飲酒後は使用しない。

体調不良をおこす恐れがあります。



使用中に眠らない。

けがや事故の恐れがあります。

禁止

アクセサリーなどの固いものや、マフラー などを付けたまま使わない。

けがや事故の恐れがあります。

肌の弱い人は素肌に使用しない。 湿疹・肌荒れなどのあるときは使用しない。

摩擦により肌を傷める恐れがあります。

動作中の各部に故意に力を加えて 無理やり止めない。

けがや故障の恐れがあります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない。 けがや故障、事故の原因になります。

本体の上に乗らない、体重をかけない。

けが・故障・事故の原因になります。

アタッチメントを外した状態で使用しな L)

専用のアタッチメント以外は使わない。

けが・故障・事故の原因になります。



ふとんなどの中や暖房器具などの熱源の 近く、直射日光のあたる場所で使わない。

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、 故障の原因になります。また変形や変質 など本体の外装を傷める恐れがあります。

火気の近くで使用したり、タバコを 吸いながら使用しない。

火災の原因になります。

アタッチメントに無理な力を加えたり、 無理に引き抜こうとしない。

破損・故障の原因となります。

お手入れにベンジン、シンナー、アルコー ル、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使用し ない。

変形や変色、変質など本体の外装を痛め るだけでなく、ひび割れによるけがの恐 れがあります。

本製品は家庭用なので、 業務用として使わない。



水などをかけない。ぬらさない。 水につけない。

*Man 熱止 感電や故障の恐れがあります。



浴室など、水のかかりやすい場所や 湿気の多い場所で使用しない、保管し ない。

水場禁止

感電や故障の原因になります。

3




各部のなまえとはたらき

付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。 製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。

(ホームページからのご購入については10ページ参照)

本 体

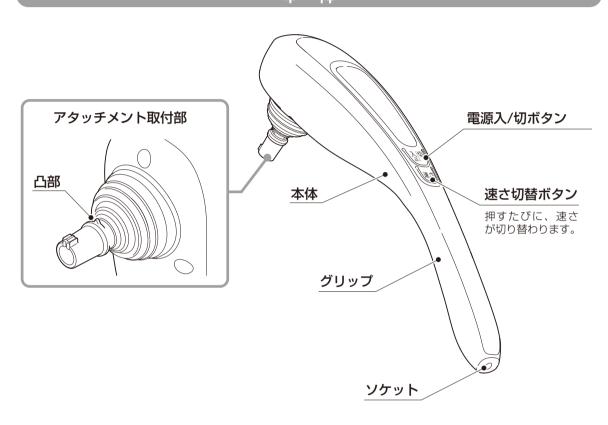

付属品

ポイントアタッチメント

疲れたところを、 ピンポイント でマッサージしたいときに。




ワイドアタッチメント

広い面をマッサージ したいときに。





型式: IVP0900-2000P (TAD35)

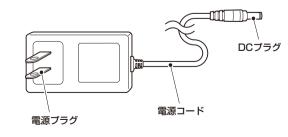



専用の電源アダプター以外は使わない。



使いかた

色注意

- 必ずアタッチメントを取り付けて使用する。
- テレビやラジオなどAV 機器から1m以上離して使う。また同じコンセントを使用しない。 雑音などが入ることがあります。

使用目的又は効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす


● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解


使いかた

- 電源アダプターが抜かれていることを確認して、本体にお好みのアタッチメントを 取り付ける。
 - ①本体の凸部とアタッチメントの凸印を 合わせてはめる。


②アタッチメントを図の矢印の方向に回して本体の凸部と

日 印を合わせる。

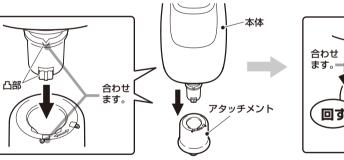

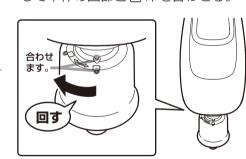


●取り外すときは、取り付けと逆の手順で、アタッチメントの □ 印が本体の凸部に合うまで回して、本体から取り外してください。

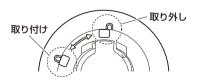

電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。

①本体のソケットに、電源アダプターのDCプラグを接続する。


②電源プラグをコンセントに差し込む。

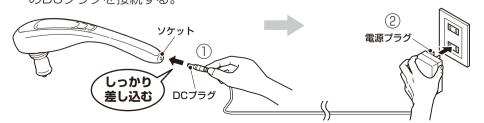

5

電源入/切ボタンを長押し(約2秒)する。速さ「おそい」で運転が始まるので、 お好みで速さ切替ボタンを押して変更する。

- ●速さは「おそい」と「はやい」の2段階から選べ、 使用中いつでも切り替えられます。 ※慣れるまでは、「おそい」での使用をお勧めします。
- ●マッサージ開始から約15分でタイマーが働いて停 止します。
- ●途中で止めたいときは、電源入/切ボタンを押して ください。

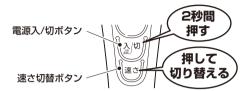


マッサージのしかた


グリップ部を持ち、アタッチメントの全面があたるように、まっすぐあててください。 ◎こんなところに使えます

・肩・背中・腕・腰・ふともも・ふくらはぎ・足裏



●ポイントアタッチメント マッサージしたいところに、 アタッチメントを軽く押しあてます。

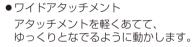

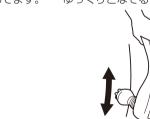



- アタッチメントを強く押しあてない。
- 次のような部位には使用しない。
- ・頭部・のど・胸部・腹部・関節や骨の上




本製品でのマッサージは1日1回、15分以内とする。また、同じ箇所への 使用は3分までとする。

筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故や体調不良をおこす恐れがあ ります。

使用後は、電源入/切ボタンを押して電源を切る。 電源プラグをコンセントから抜き、本体から電源アダプターを外す。

●使用後は、次回使用時に支障がないようお手入れをし、陽のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。

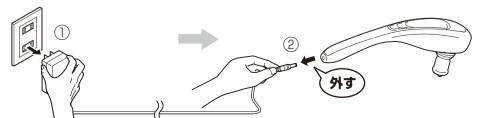



お手入れのしかた

必ず電源アダプターを外してからお手入れをしてください。

本体・アタッチメント

乾いたやわらかい布でふき取る。

汚れがひどい場合は、やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、 よくしぼって汚れなどをふき取ってから、やわらかい布でからぶきする。

雷源アダプター

乾いたやわらかい布でふき取る。

電源コードがねじれていたら、ねじれをほどく。







水につけたり、水をかけたりしない。

● ベンジン、シンナー、アルコール、アルカ リ性洗剤、漂白剤などをよごれ落としとし て使わない。

長期間使用しないときは

- ●長期間使用しないときは、次回使用時に支障がないように「お手入れのしかた」に従って清掃し、 ほこりが付かないように布などのカバーをかけて保管してください。
- ●電源コードは、ねじれをほどいてから保管してください。 ※本体や電源アダプターに巻き付けない。

中国製

	販 売 名	ハンディマッサージャー	類 別	機械器具 77 バイブレーター				
仕様		TMS100	一般的名称	家庭用電気マッサージ器				
	電源	AC100V 50/60Hz		(JMDNコード 34662000)				
	消費電力	10W	医療機器分類	管理医療機器				
	本体定格電圧	DC9V	医療機器認証番号	231AABZX00018000				
	本体消費電力	9W	医療機器	株式会社惣田製作所				
	定格時間	15分	製造販売業	〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492				
	内蔵タイマー	約15分	材 質	本体:ABS樹脂				
	質 量	600g (本体のみ)		アタッチメント:ABS樹脂				
	電源コード長さ	約1.8m						
	寸 法	高さ380×幅77×奥行き125 (mm) (本体のみ)						
	使用目的 又は効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 ● 疲労回復						

電源アダプターに表示されている (医) マークは、医療機器としてPSE (電気用品安全法) と 同等の電気安全試験に適合していることを示しています。



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、 お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)

こんなときは

考えられる原因

電源が入らない。 動かない。

- 電源プラグが抜けている。
- 電源アダプターのDCプラグが 抜けている。
- 電源入/切ボタンを長押ししてい ない。
- 停止してしまった。
- ●マッサージ開始から15分以上 経っている。(自動停止した)
- 雷源コード・雷源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。
- 電源コードがねじれて戻らなくなった。
- 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。

その他の異常・故障がある。

- 電源プラグを確実に差し込む。
- ●電源アダプターのDCプラグ を本体のソケットにしっかり 差し込む。

処置の方法

- 電源入/切ボタンを2秒間押す。
- ●故障ではありません。
- ※使用時間は1日1回、15分以 内にしてください。

ただちに使用を中止し、専用の別 売電源アダプターと交換する。最 寄りの取扱店にご用命ください。 本体側に異常がある場合は、「お 客様ご相談窓口」にご相談くださ い。(10ページ参照)

ただちに使用を中止し、「お客 様ご相談窓口」にご相談くださ い。(10ページ参照)

廃棄について

地球環境保護のため、本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



アフターサービス

1.保証書について -

保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容 にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場 合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は 製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での 分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売 店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客 様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:9時~17時 (十・日・祝日・弊社休業日を除く)

● 修理についてのお問い合わせ

|連詰り 0120-343-122

●その他のお問い合わせ

|通話し 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。 URL http://www.tescom-japan.co.jp/support/ ●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用 ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、 送料等がかかります。

URL ► https://www.tescom-shop.jp/parts/

10

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

愛情点検



●長年ご使用のマッサージャーの点検を!

こんな症状は

- ●電源アダプターやコードが異常に熱くなる。 ありませんか
 - ■こげ臭いにおいがする。●ボタンを押しても時々運転しないことがある。

●その他異常や故障がある。

ご使用 中止

事故防止のため、ご使用を中止 し電源プラグをコンセントから 抜いて、販売店に点検・修理を ご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使 用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保 証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故 障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故 障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い 上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換え られた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができな 「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相 談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」 の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使 用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

				保	証	1	持込修理		
	品 番 TMS100		保証期間お買い上げ年月		月日より 1年間	保証対象	本体		
	★お客様	ご芳名)	様	★販売店	★お買い上げ年月日	年 月	■日
		ご住所	(₹				住所・店名		
	AKI.	お電話					電話		

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1